

# HYALO GYN®

cu Hydeal-D 0.2%

Formulă fără parabeni

## Informații despre produs

Epiteliul vaginal are în mod normal un aspect catifelat și este suplu datorită unui mecanism de echilibrare delicat care menține starea normală de hidratare și de lubrifiere.

În anumite momente din viața unei femei (de ex. după naștere, în timpul alăptării sau la menopauză), după anumite tratamente farmacologice sau boli specifice sau în anumite perioade de stres, se poate produce o tulburare a acestui echilibru delicat, ceea ce determină un disconfort important manifestat prin uscăciune vaginală și senzația de arsură sau de mâncărime la nivel vaginal.

Senzația de arsură și iritația sunt însoțite frecvent de mici leziuni ale epitelului produse de fricțiunea cauzată de lipsa de lubrifiere.

În aceste cazuri se recomandă utilizarea unui produs cu aplicare locală care să favorizeze hidratarea mucoasei vaginale, ajutând la restabilirea elasticității și a supleții sale naturale.

HYALO GYN este un gel incolor, cu proprietăți puternice de hidratare, care conține Hydeal-D, un derivat al acidului hialuronic ce permite eliberarea prelungită la locul aplicării.

Acidul hialuronic este un compus natural responsabil de menținerea nivelului corespunzător de hidratare a țesuturilor, alături de rolul său esențial în procesele reparatorii ale țesutului.

Compoziția bazată pe Hydeal-D asigură aderența optimă la mucoasa vaginală, are un efect hidratant prelungit și favorizează procesul natural de vindecare a microleziunilor.

## Compoziție

Componenta principală: Hydeal-D 0,2% (derivat al acidului hialuronic cu eliberare prelungită)

Alte componente: Propilen glicol, Metilpropandiol, Carbomer, 1,2-Hexandiol, Caprilil glicol, Hidroxid de sodiu, Apă purificată.


Această formulă nu conține parabeni sau alte tipuri de conservanți.

## Indicații

Gel pentru tratamentul complementar al uscăciunii vaginale din cauze variate; ajută procesul natural de vindecare a microleziunilor mucoasei vaginale induse de fricțiune.

## Mod de utilizare

1. Înșurubați ferm aplicatorul la duza tubului
2. Comprimați tubul pentru a umple aplicatorul până la nivelul opritorului.
3. Deșurubați aplicatorul de pe tub. Se recomandă eliberarea unei cantități mici de gel din aplicator înainte de utilizare, pentru lubrifierea vârfului aplicatorului înainte de introducerea acestuia intravaginal.
4. După spălarea cu grijă a mâinilor și a zonei din jurul vaginului, inserați aplicatorul intravaginal stând în poziție ghemuită sau culcată și împingeți pistonul aplicatorului până ce acesta se golește complet de gel.
5. Scoateți apoi aplicatorul. Acesta este de unică folosință și trebuie aruncat după utilizare.

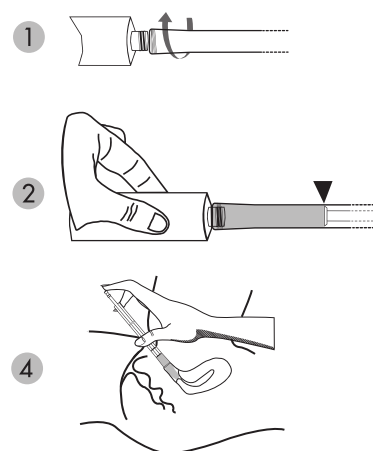

## Frecvența utilizării

Frecvența utilizării produsului depinde de gradul de uscăciune al mucoasei vaginale. Se recomandă aplicarea o dată la 3 zile, timp de 30 de zile sau în funcție de recomandarea medicului. Tratamentul nu necesită întrerupere în timpul menstruației.

## Contraindicații

Alergie dovedită față de componentele produsului.

## Atenționări și precauții

În cazul infecției vaginale, consultați medicul înainte de utilizarea produsului.

Este posibilă apariția tranzitorie a senzației de arsură sau de căldură vaginală în cazul pacientelor cu o anumită sensibilitate individuală la componente ale produsului și/sau la începutul tratamentului. În cazul persistenței senzației de arsură, se recomandă întreruperea tratamentului și consultarea medicului.

Produsul nu influențează rezultatele testelor ginecologice.

Acest produs este compatibil cu prezervativele lubrificate sau nelubrificate din latex ori din poliizopren.

Acest produs nu este compatibil cu prezervativele din poliuretan.

A nu se utiliza concomitent cu produsele care conțin săruri cuaternare de amoniu, cum ar fi clorura de benzalconiu, deoarece acidul hialuronic poate precipita în prezența acestora.

Fiecare aplicator este de unică folosință și trebuie aruncat după utilizare. În cazul reutilizării, Fidia Farmaceutici nu poate garanta performanța, funcționalitatea sau igiena aplicatorului.

Dacă ambalajul prezintă deteriorări care afectează integritatea tubului, produsul nu trebuie utilizat.

Nu aruncați ambalajul gol în mediul ambiant.

Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

## Efecte adverse

Ca și în cazul altor produse utilizate pentru tratamentul uscăciunii vaginale, se pot produce mici scurgeri albicioase, inodore.

## Depozitare

A se depozita la temperaturi care să nu depășească 30°C.

A nu se congela.

## Ambalare

Cutia conține un tub de 30 g și zece aplicatoare vaginale de unică folosință ambalate ermetic.

## Producător

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano Terme (PD) – ITALIA



Data ultimei revizuirii a informațiilor despre produs și a instrucțiunilor de utilizare: Septembrie 2017



Consultați instrucțiunile de utilizare



Limită de temperatură



Termen de valabilitate



Producător



Cod lot



Nu reutilizați



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat