


# PEPSINO

## Classe II° Romania

Nome:	PEPSINO Classe II° Romania
Codice:	
Tipo Carta:	USOMANO 60gr/mq bianco
F.to carta:	150x200 mm.
Piega:	SI finito 25 mm
Stampa:	1 colore BLU REFLEX

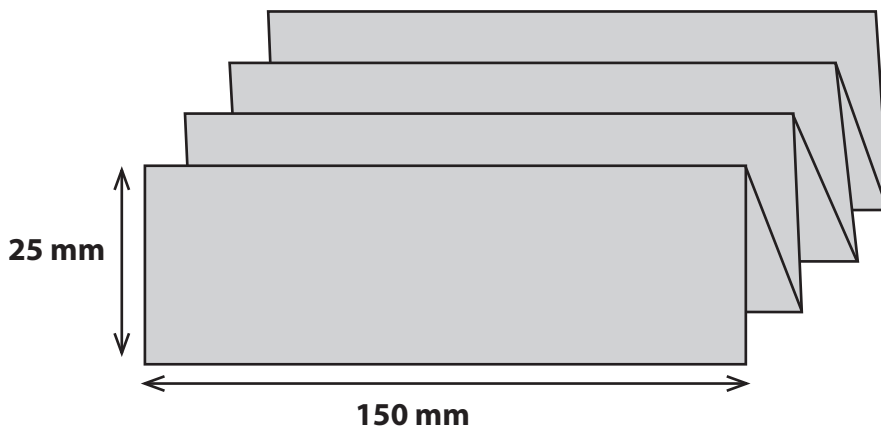

2 bozza  
del  
29 -9-2021

# PepsinO®

RO

## Spray oral

**Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să utilizați acest produs.**

### 1. Ce este PEPSINO® și pentru ce se utilizează

PEPSINO® este un dispozitiv medical cu acțiune mecanică, indicat pentru reducerea simptomelor laringofaringiene ale refluxului gastroesofagian, cum ar fi: globus faringian (senzația de corp străin în gât), tuse, nevoie de "a drege glasul", uscăciune sau iritare laringofaringiană etc.

PEPSINO® poate, de asemenea, lubrifia și mucoasa laringofaringiană, ajutând procesele de reepitelizare.

Pentru utilizare topică orală.

### 2. Ce trebuie să știți înainte să luați PEPSINO®

- Nu luați PEPSINO® în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingredientele produsului (enumerare în secțiunea 6).
- Nu luați PEPSINO® dacă sunteți gravidă sau alăptați.

### 3. Cum să utilizați PEPSINO®

- Ridicați canula pentru pulverizare.
- Când este utilizat pentru prima dată, îndreptați spray-ul departe de cavitatea bucală și apăsați pompa de câteva ori până când apare prima pulverizare.
- Introduceți canula în gură și direcționați pulverizarea către gât, apăsând cu fermitate pompa de dozare.
- Aplicați 2 pulverizări de 3-4 ori pe zi până când simptomele dispar sau conform recomandării medicului.

### 4. Atenționări

- Dacă simptomele persistă, în ciuda tratamentului, consultați un medic.
- În caz de reacție adversă, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.
- Nu aplicați produsul simultan cu aplicarea altor medicamente sau produse topice.
- Evitați contactul cu ochii.
- Nu depășiți doza recomandată și urmați instrucțiunile.
- Nu utilizați acest produs dacă ambalajul original nu pare intact sau există dovezi de modificare (de exemplu, dacă este re-etichetat). Modificarea și/sau neintegritatea ambalajului ar putea compromite cerințele de siguranță ale produsului.
- Nu utilizați acest produs după data de expirare afișată pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corespunzător.
- Utilizați produsul numai pentru un singur pacient.

### 5. Cum se păstrează PEPSINO®

- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
- A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.

### 6. Alte informații

**Ingrediente:** apă purificată, fructoză, extract fluid de Camellia sinensis (ceai verde), alginat de magneziu, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, sare de sodiu cu acid hialuronic, sare disodică EDTA, citrat de potasiu, acid citric, aromă de mentă.

### Prezentare

- Flacon cu spray oral de 30 ml.

**Unitate destinată pentru piața din România.**

#### Distribuitor:

S.C. 3F Plantamed S.R.L.,  
Calea Victoriei 103-105, Sector 1, București  
Tel: 021 316 8931, Fax: 021 312 9580  
www.3fplantamed.ro



FABRICAT ÎN ITALIA



**DMG Italia srl**  
via Laurentina Km. 26,700  
Pomezia (Rome) - ITALIA  
www.dmgit.com



Rev. 03/2020