



Sun Wave Pharma

# RESPI SUN®

65NOT2054/A

- ✔ **Soluție salină hipertonică 3% pentru inhalații**
- ✔ **24 unidoze a câte 4 ml**
- ✔ **Fără conservanți**

## Indicații:

- Crește mobilizarea secrețiilor în tractul respirator inferior prin efect osmotic, de exemplu în bronșiolită, fibroză chistică, bronșiectazie etc.
- Previne uscarea mucoasei bronșice
- RespiSun®, soluție salină hipertonică 3% pentru inhalare, poate fi utilizată folosind nebulizatoare cu compresor sau cu ultrasunete

## Compoziție:

Clorură de sodiu – 3 g, apă purificată qs ad 100 ml.

## Mod de utilizare:

Doza recomandată de RespiSun® este de 1 fiolă de 2 până la 4 ori pe zi.

Se detașează unidoza și se deschide prin învârtirea părții superioare.

Turnați soluția de inhalat în nebulizator.

Utilizați nebulizatorul conform instrucțiunilor furnizate de producătorul acestuia.





65NOT2054/A

### Reacții adverse:

În cazuri rare, pot apărea iritații temporare (de exemplu tuse) sau constricții reversibile ale bronhiilor. Este recomandată administrarea în prealabil a medicației bronhodilatatoare. Dacă apar efecte adverse, întrerupeți tratamentul și cereți sfatul medicului sau farmacistului.

### Precauții la utilizare:

- De unică utilizare
- Destinat strict pentru inhalare
- A nu se utiliza injectabil
- Verificați integritatea fiolelor unidoză înainte de utilizare. Nu utilizați fiolele dacă sunt deteriorate
- Urmați instrucțiunile de utilizare ale nebulizatorului
- Dacă există tendința de a dezvolta dispnee sau hipersensibilitate, inhalarea soluției nu se va realiza fără supraveghere medicală
- Nu se va amesteca cu medicamente
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- A nu se utiliza după data de expirare
- După deschidere fiolele unidoză se vor utiliza imediat și dacă rămâne soluție se va arunca; deoarece produsul nu conține conservanți există riscul de administrare a unei soluții contaminate dacă aceasta este reutilizată după deschidere

Soluția salină hipertonică 3% pentru inhalare este un dispozitiv medical Clasa IIa  
Data marcării CE: 11.12.2013. Data revizuirii instrucțiunilor: 12.2013

### Fabricant:

Laboratoire UNITHER  
ESPACE INDUSTRIEL NORD  
151, Rue André Durouchez  
CS 28028  
80084 AMIENS Cedex 2  
Franța

Fabricat în Franța



**STERILE A**

### Distribuitor:

ASCENDIS WELLNESS SRL  
Calea Floreasca, nr. 169  
Sector 1, București, România  
office@sunwavepharma.com



**Sun Wave Pharma**