

ENAC000 Adaptor conectare directa la pungi de stocare Importator :EduClass SRL Bd. Unirii nr.9, sect 4 Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro Reprezentant european: OBELIS S.A., Adresa: Av. De teruren 34, bte 44, b-1040, Bruxelles, Belgia,Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003, email: mail@obelis.net. Fabricant: Uzinmedicare Co., Adresa: Gyeonggi-Do 462-807, Coreea, Tel. +82-31-739-5271, email: master@uzinmedical.co.kr Pentru confort si o colectare rapida a laptelui matern alege adaptorul pentru conectare directa la pungile de stocare. Usor de utilizat. Nu contin BPA. Se poate conecta direct la cupa pompei dvs. Spectra si la punga de stocare a laptelui matern astfel ca puteti colecta laptele direct in punga, nefiind necesar sa mai transferati laptele. Pentru curatare utilizati o perie pentru biberoane, detergen lichid pentru vase si apa din belsug. Produs in Coreea. Atentie! NU tineti de zona cu clema atunci când pompați pentru a evita eliberarea pungii de stocare si varsarea laptelui ! Componentele care intra in contact cu laptele trebuiesc sterilizate inainte de fiecare utilizare. Laptele matern poate fi stocat 72 de ore in frigider si pana la 2 luni in congelator. Laptele dezghetat poate fi stocat 24 de ore in frigider. Laptele matern nu se incalzeste la microunde si nu se fierbe. Folosirea componentelor la mai multe persoane poate duce la transmiterea diverselor boli. Acest produs este un accesoriu pentru dispozitive medicale/uz personal si nu intra sub incidenta O.U.G. 34/2014 art 3, alin 3, lit b, privind returul produselor. Cod de bare 8809108014108