

RinoSun[®]

Indicații: pentru tratamentul durerilor de gât la copiii cu vârsta peste 3 ani.

Forma de prezentare: recipient din aluminiu cu pulverizator, de 20 ml.


Compoziție: glicerol, miere, apă, propolis, Glycocyandin-e (extracte de Vitis vinifera, Sambucus nigra și Glycine max).

Mod de acțiune: RinoSun este o soluție hipertonică, care formează un film de protecție la nivelul mucoasei, special formulat să trateze durerile de gât ale copiilor cu vârsta peste 3 ani. Când este pulverizat în gât, RinoSun formează un film osmotic activ care atrage prin acțiune mecanică fluidul hipotonic de la nivelul gâtului. Acest flux puternic de lichid detașează mecanic și drenează toți contaminanții prezenți la nivelulul gâtului, incluzând bacterii, virusuri, particule de praf, celule moarte și resturi celulare. Dispozitivul acționează astfel ca o soluție instantanee de curățare. RinoSun este îmbogățit cu propolis; o mucoasă a gâtului curată îmbunătățește apărarea locală și accelerează procesul de vindecare.

Filmul creat protejează, de asemenea, gâtul de iritarea și agresiunea externe, și astfel reduce durerea.

Aplicat din faza inițială a infecției, RinoSun ajută la prevenirea evoluției acesteia.

Instrucțiuni de utilizare: agitați ușor recipientul, îndepărtați capacul, și, înainte de prima utilizare, apăsați o dată sau de două ori pe pulverizator pentru punerea în funcțiune a pompei dozatoare. Apoi îndreptați vârful aplicatorului dispozitivului cum se arată în imaginea de mai jos și apăsați pe pulverizator pentru a elibera produsul în partea superioară a gâtului. Pulverizați de 4 – 5 ori pentru a forma un strat subțire de produs la nivelul mucoasei gâtului. Se recomandă utilizarea la fiecare 20 – 30 minute la începutul tratamentului în primele 2 – 3 ore, și apoi de 3 – 4 ori pe zi, până la recuperarea completă.

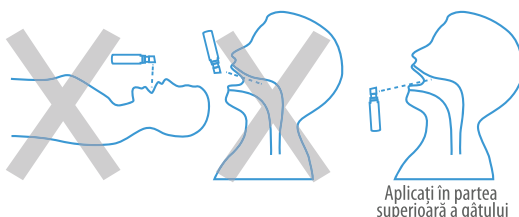

Precauții: citiți cu atenție instrucțiunile din prospect. Spălați-vă pe mâini înainte de utilizarea dispozitivului. Produsul este doar pentru uz topic. Pulverizați doar în partea superioară a gâtului, evitând inhalarea în timpul pulverizării. Se va evita consumul de alimente sau lichide în următoarele 15 – 30 minute după aplicarea produsului. Nu se va folosi la copiii care sunt alergici sau sensibili la oricare ingredient din compoziția produsului (mierea și propolisul pot conține urme de polen). Solicitați sfatul medicului dacă simptomele persistă fără să existe vreo îmbunătățire după un tratament de 7 zile cu RinoSun. Acoperiți flaconul cu capac după fiecare utilizare. Produsul fiind vâscos, unele picături de produs pot rămâne pe vârful pulverizatorului; ștergeți vârful cu ajutorul unei hârtii absorbante sau al unui bețișor igienic din bumbac după fiecare utilizare. Dozajul zilnic furnizează mai puțin de 2 g zahăr pe zi. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Păstrați la temperatura camerei. Nu păstrați produsul la frigider; feriți-l de îngheț. Nu utilizați produsul dacă pulverizatorul este deteriorat, nu folosiți produsul după data de expirare sau mai mult de 30 de zile după prima utilizare.

RinoSun nu conține niciun ingredient dăunător. În absența unor date suficiente, nu vă recomandăm utilizarea acestui produs la copiii cu vârsta sub 3 ani fără consiliere medicală.

Contraindicații: Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 1 an.

Efecte adverse: RinoSun nu are efecte adverse cunoscute și nu este periculos dacă este înghițit. Dacă observați, în primele minute după aplicarea produsului, vreun tip de reacție alergică, încetați să utilizați produsul și spălați gâtul cu apă curată, proaspătă și, eventual, consultați un profesionist din domeniul medical.

Revizuire prospect/versiune: PEP b1-0618

Producător:
VITROBIO SAS
ZAC de Lavour
63500 ISSOIRE
France

Fabricat în Franța

Distribuitor:
ASCENDIS WELLNESS SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
office@sunwavepharma.com

